

DATO:	REV.DATO:	UTARBEIDET AV:	GODKJENT AV:
18.02.26	11.11.25	Helsefaglig operatør Lene Stenberg	Hege Merethe Hagen Daglig leder av Responsssenteret

Responsssenteret- Prosedyre for testing av Safemate

Formål:

Sikre at safemate virker og oppdaterer seg på posisjon

Bruksområde:

Ansatte i Responsssenteret

Ansvar:

Daglig leder i Responsssenteret har ansvaret for at prosedyren er korrekt og at den blir gjort kjent for alle medarbeidere i Responsssenteret. Alle medarbeidere gjør seg kjent med prosedyren og skal følge den i sitt arbeid.

Handling:

Tester skal gjennomføres hver 3. måned. Januar-april-juli-oktober

- Varsle tjenesten på Varsling 24 om at vi gjennomfører test
- Skriv ut lister på aktive alarmer
- Sjekk at TM og utsyr står aktivt
- Sjekk logg om det har vært alarm i inneværende måned
- For TM som bor på institusjon – kontakt HT og be de utløse alarmer
- For hjemmeboende – sjekk tjenestemottaker om det står i bemerkninger at andre skal kontaktes ved varsler – ring så TM eller pårørende/andre og be de trykke på/utløse alarmer
- Ved gjentatte forsøk uten å få tak i TM – prøv pårørende om de kan hjelpe til, om dette ikke løser det, ring HT
- Hvis det må trykkes flere ganger før alarmer går gjennom til RS, be de utløse den en gang til